



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES



# ESTERILIZADOR CALOR/SECO

MARCA : EFISA  
MODELO : LABORATORY

## DESCRIPCIÓN:

La esterilizadora al seco esta hecho de acero inoxidable para la esterilización de instrumental medico, material medico, esta puede ser utilizada en hospitales, clínicas, consultorios médicos, consultorios de podologia, etc.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Apagado automático con termostato graduable
- Timer de control de tiempo graduable de 0 a 120 minutos.
- 2 foco piloto que indica el trabajo de esterilización.
- Bandejas móviles de acero inoxidable para la esterilización del instrumental.
- Espatula de metal con manco de madera
- Corriente directo 220 V

## CUADRO DE ESTERILIZADO REFERENCIAL:

### Materiales:

- Vidrio, Temperatura 160°, Tiempo de exposición 60 min.
- Instrumental, Temperatura 160°, Tiempo de exposición 60 min.
- Ropa, Temperatura 160°, Tiempo de exposición 30 min.
- Jebe, Temperatura 160°, Tiempo de exposición 10 min.
- Aceite, Temperatura 160°, Tiempo de exposición 120 min.
- Gasa, Temperatura 160°, Tiempo de exposición 20 min.

## RECOMENDACIONES:

- Coloca la esterilizadora en un lugar ventilado alejado de las sustancia inflamable y sobre superficie metálica. El desfogue del calor ubicado en la parte posterior del estabilizador debe estar libre. No introducir líquidos que pueden ocasionar desperfectos.

Fabricación de 6, 8, 12,16, 18, 20, 30, 60, 80, 100 a más litros.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe